




INSTRUCTIEKAART DRESSBUDDY

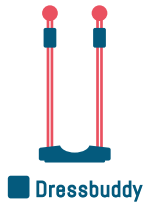

De Dressbuddy kan u helpen met het aan- en uittrekken van steunkousen. Het hulpmiddel bestaat uit een frame en kan gebruikt worden bij steunkousen met open en gesloten teenstuk. Door het gebruik van de DressBuddy is bukken niet meer nodig.

Hoe gebruikt u de DressBuddy? Bij het aantrekken van de steunkous


- 1** Maak een boord in de kous van minimaal 8 centimeter, dit doet u aan de bovenkant van de kous bij de elastische band.
- 2** Leg de DressBuddy op uw schoot, plaats hierbij de gele bollen naar boven.
- 3** Span de kous over de gele bollen, zorg ervoor dat de hiel naar boven is gericht.
- 4** Pak de glijzak en stop deze tot aan de hiel in de kous.
- 5** Draai de DressBuddy om en leg deze zo plat mogelijk voor u neer op het matje. De steunkous en de glijzak liggen nu beide op de grond met ruimte tussen de steunkous en de glijzak.
- 6** Schuif uw voet over de glijzak in de steunkous. Herhaal dit tot de voet op z'n plaats in de kous zit.
- 7** Trek de kous met behulp van de DressBuddy omhoog en haal de kous van de DressBuddy af.
- 8** Trek de glijzak uit de kous en breng de kous op de juiste hoogte. Ga hierbij uit van twee vingers onder de knieholte.

De instructies gaan verder op de volgende pagina.





INSTRUCTIEKAART DRESSBUDDY

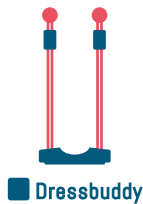

Hoe gebruikt u de DressBuddy? Bij het uittrekken van de steunkous

- 1** Maak een boord in de glijzak en vouw deze over de gele bollen van DressBuddy.
- 2** Stap in de glijzak.
- 3** Vouw de boord van de steunkous om en plaats de blauwe bollen van de DressBuddy hieronder, de gele bollen zijn van u af gericht.
- 4** Dus de DressBuddy van u af, laat hierbij langzaam de steunkous over de glijzak glijden zodat de steunkous makkelijk van uw been af glijdt.
- 5** Duw de DressBuddy naar beneden. Trek uw been terug, totdat de kous uit is. Of strek het been en duw de DressBuddy van u af tot de kous uit is

Meer zien?

Bekijk het filmpje: youtube.com/watch?v=zpZym3X0r2M

Meer lezen? Ga naar:

hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/frame-voor-steunkous-hand of scan de QR code:

